

TECHNIC EXPORT

6, Avenue du Coq
75009 PARIS

Tél. : 00 33 1 48 78 08 84

Fax : 00 33 1 49 95 94 40

E. mail : info@technicexport.com

Site internet : www.technicexport.com

UNITE MEDICALE AVANCEE MOBILE TEX UMAM



L'unité médicale avancée mobile TEX UMAM déployée

L'unité médicale avancée mobile **TEX UMAM** est conçue pour apporter une solution rapide à une situation de crise avec blessés et victimes de catastrophes naturelles - y compris de pandémie.

L'unité **TEX UMAM** se déploie, en un temps record - deux heures et vingt minutes - et se replie tout aussi rapidement.

Le principe fonctionne, au moyen de deux éléments, qui la composent :


1 / **L'AMD 60 ou 120** - Abri Mobile Déployable de 60 m² ou 120 m²

2/ **Le Container TEX UMA 55** - Unité Mobile Avancée de 55 m² - aisément déposable au sol grâce aux vérins incorporés et, déployable par deux extensions - droite et gauche.

Surfaces couvertes suivant compositions : 60 m² - 120 m² - 240 m² pour l'AMD
55 m² - 110 m² pour le TEX UMA 55

Toutes les fonctions de Poste Médical Avancé sont rendues opérationnelles sur site. L'arrivée, l'enregistrement, le tri, le soin de premier niveau des patients et des blessés, jusqu'à l'évacuation vers les centres hospitaliers.

Le traitement de l'Urgence Relative et de l'Urgence Absolue peut s'exécuter dans des conditions optimales.

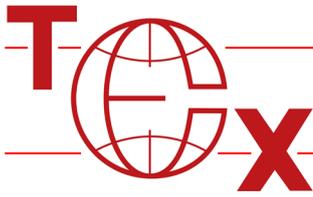


TECHNIC EXPORT

SOMMAIRE


<u>I – DESCRIPTION DE L’UNITE TEX UMAM</u>	PAGE 3
COMPOSANTS AVEC INTERCOMMUNICATIONS :	
A – L’AMD 60	PAGE 4
B – L’AMD 120	PAGE 6
C – LE CONTAINER TEX UMA 55	PAGE 7
D – TRANSPORT ET MISE EN PLACE	PAGE 7
<u>II – COMPOSITIONS POSSIBLES DE L’UNITE TEX UMAM</u>	PAGE 8
A – <u>TEX UMAM – A</u> : 1 AMD 60 + 1 TEX UMA 55	PAGE 8
B – <u>TEX UMAM – B</u> : 1 AMD 60 + 2 TEX UMA 55	PAGE 9
C – <u>TEX UMAM – C</u> : 2 AMD 60 + 1 TEX UMA 55	PAGE 10
D – <u>TEX UMAM – D</u> : 2 AMD 60 + 2 TEX UMA 55	PAGE 11
<hr/>	
E – <u>TEX UMAM – A</u> : 1 AMD 120 + 1 TEX UMA 55	PAGE 12
F – <u>TEX UMAM – B</u> : 1 AMD 120 + 2 TEX UMA 55	PAGE 13
G – <u>TEX UMAM – C</u> : 2 AMD 120 + 1 TEX UMA 55	PAGE 14
H – <u>TEX UMAM – D</u> : 2 AMD 120 + 2 TEX UMA 55	PAGE 15
<u>III – EQUIPEMENTS DE L’UNITE TEX UMAM</u>	PAGE 16
<u>IV - PHOTOS</u>	PAGE 21

I – DESCRIPTION DE L'UNITE TEX UMAM


Noria de ramassage

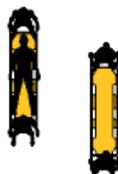


AMD 60 ou 120
Zone de tri avec lits
et brancards +
secrétariat d'entrée

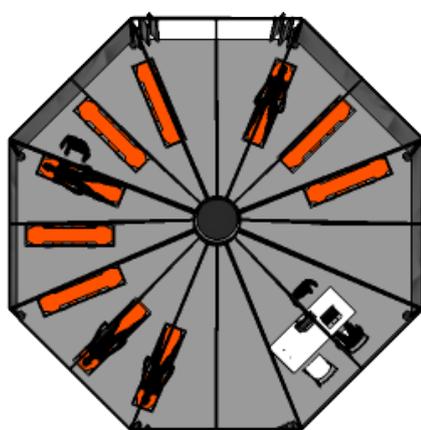

Tente pour passage
couvert


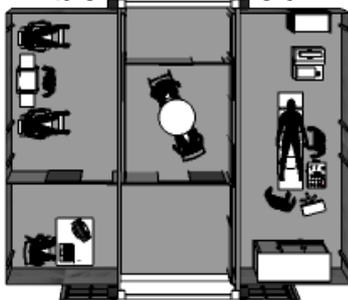


Groupe électrogène
sur remorque

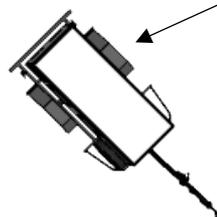

TEX UMA 55

- Container comprenant :
- Une cellule d'urgence relative
 - Une cellule d'urgence absolue
 - Une cellule d'urgence médico-psychologique
 - Un secrétariat de sortie

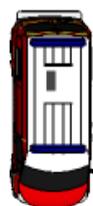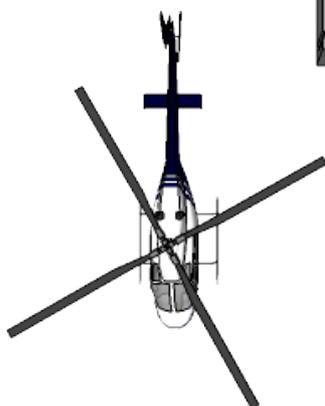


Noria d'évacuation

A. L'AMD 60 :




Superficie couverte de 60 m²
Temps de déploiement : 20 mn

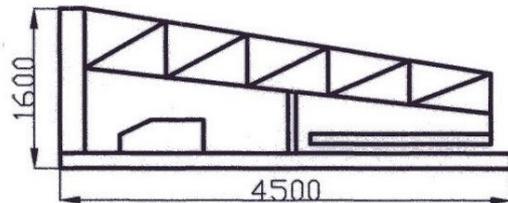

Vue en coupe de l'AMD 60 en position transport

Dimensions transport :
 Longueur remorque : 5,00 m
 Largeur remorque : 1,80 m
 Hauteur remorque : 2,50 m
 Poids : 2 500 Kg

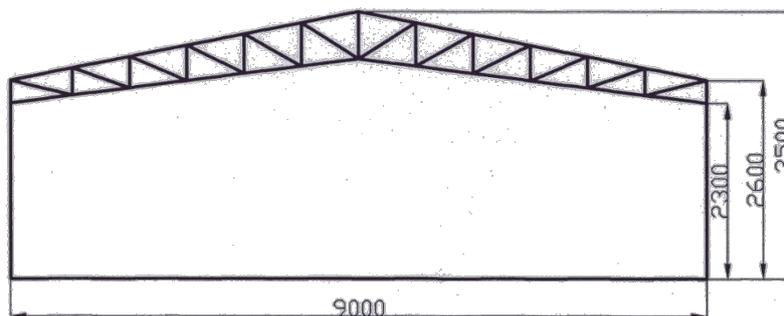

Vue en coupe de l'AMD 60 en position site

Dimensions site :
 Diamètre : 9,00 m
 Hauteur : 3,50 m
 Pans : 8
 Longueur pan : 3,40 m

Déploiement de l'AMD 60




**60 m² en
20 minutes**

B. L'AMD 120 :




Superficie couverte de 120 m²
Temps de déploiement : 40 mn

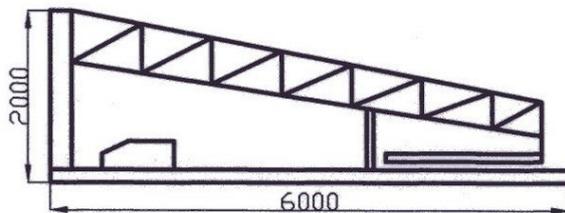


Vue en coupe de l'AMD 120 en position transport

Dimensions transport :
Longueur remorque : 6,50 m
Largeur remorque : 2,40 m
Hauteur remorque : 3,00 m
Poids : 3 500 Kg

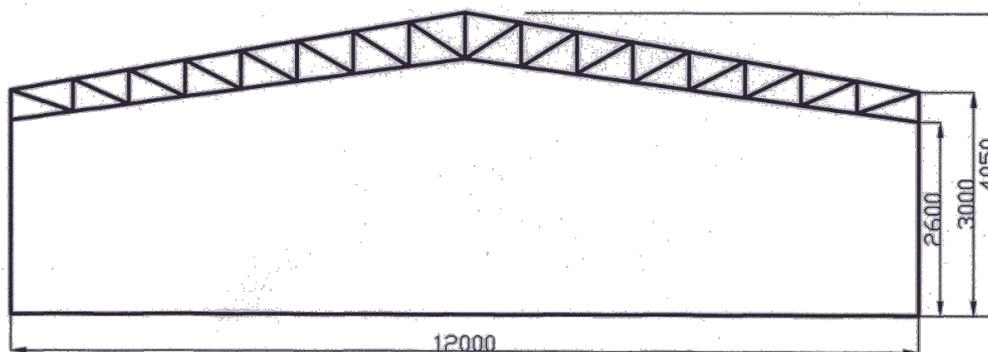

Vue en coupe de l'AMD 120 en position site

Dimensions site :
Diamètre : 12,00 m
Hauteur : 4,05 m
Pans : 10
Longueur pan : 3,80 m

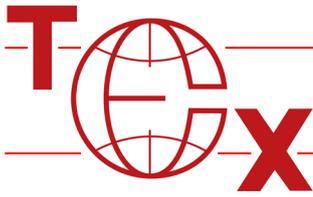

TECHNIC EXPORT

C. LE CONTAINER TEX UMA 55 :

Container déposable et déployable avec extensions droite et gauche en toute autonomie.

Container de 20 pieds avec une superficie de 55 m²

Temps de mise en place : 2 h 00 mn



Dimensions transport :

Longueur container : 6,06 m

Largeur container : 2,44 m

Hauteur container : 2,59 m

Vue du container TEX UMA 55 en position transport

Dimensions site :

Longueur container : 6,06 m

Largeur container : 2,44 m

Hauteur container : 2,59 m

Longueur d'une extension : 5,50 m

Largeur d'une extension : 2,00 m



Vue du container TEX UMA 55 en position site

D. TRANSPORT ET MISE EN PLACE :

Transport et emplacements rationnels pour chaque élément.


Mise en place sur site ou départ de site pour autre implantation en 2h 20 mn.

Personnel de montage : 2 x 2 hommes.

II – COMPOSITIONS POSSIBLES DE L’UNITE TEX UMAM



A. TEX UMAM – A : 1 AMD 60 + 1 TEX UMA 55

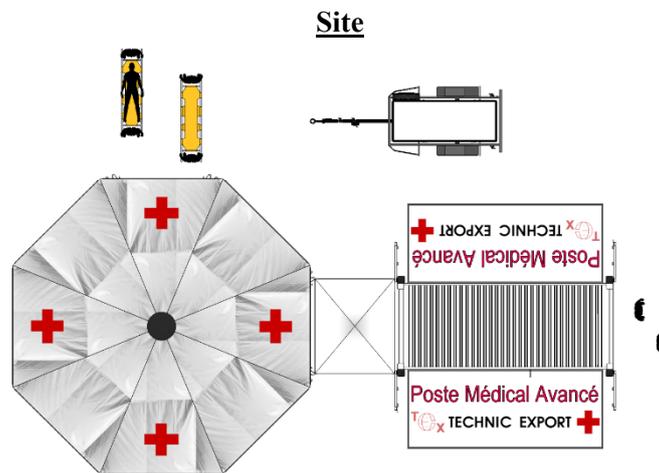

Mise en place ou
départ du site :

2 h 20
4 hommes

1 AMD 60 (8/10 lits)
+ 1 container **TEX UMA 55** déployable avec extensions droite et gauche

Transport




- 1 camion porte-container
- 1 container **TEX UMA 55**
- 1 remorque AMD 60



- 1 camion bâché
- + matériels + équipements
- 1 remorque groupe électrogène 125 kVA

B. TEX UMAM – B : 1 AMD 60 + 2 TEX UMA 55

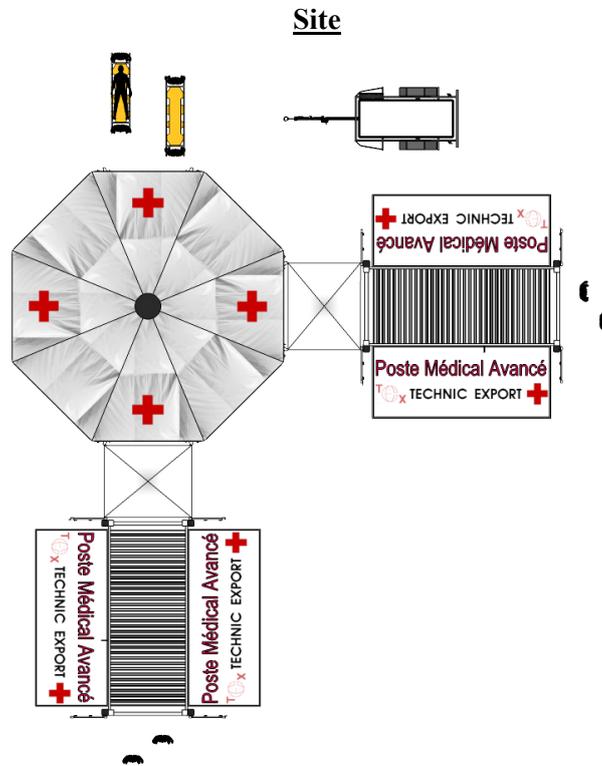

Mise en place ou
départ du site :

4 h 20
6 hommes

1 AMD 60 (8/10 lits) +
2 containers **TEX UMA 55** déployables avec extensions droite et gauche

Transport



- 1 camion porte-container
- 1 container **TEX UMA 55**
- 1 remorque AMD 60




- 1 camion porte-container
- 1 container **TEX UMA 55**
- 1 remorque groupe électrogène 125 kVA



- 1 camion bâché
- + matériels + équipements

C. TEX UMAM – C : 2 AMD 60 + 1 TEX UMA 55

Site

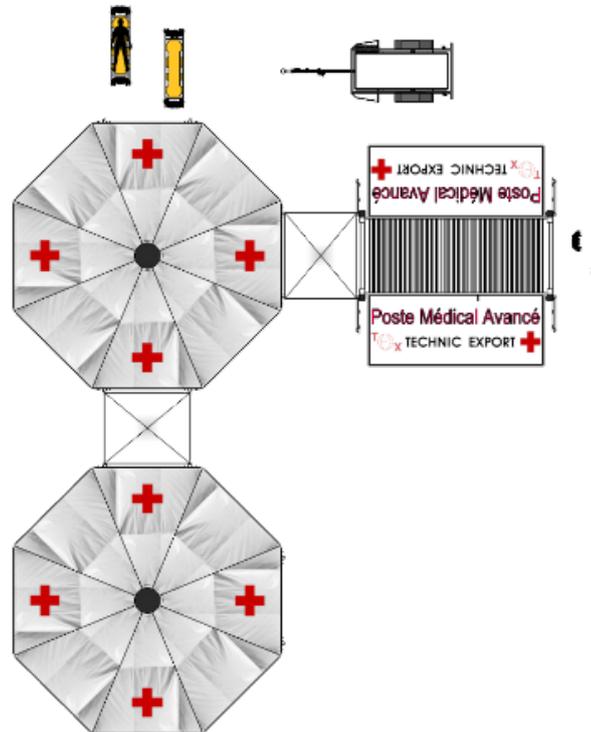

Mise en place ou
départ du site :

2 h 40
6 hommes

2 AMD 60 (16/20 lits) +
1 container **TEX UMA 55** déployable avec extensions droite et gauche

Transport



- 1 camion porte-container
- 1 container **TEX UMA 55**
- 1 remorque AMD 60



- 1 camion bâché
- + matériels + équipements
- 1 remorque AMD 60




- 1 camion bâché
- + matériels + équipements
- 1 remorque groupe électrogène 125 kVA

D. TEX UMAM – D : 2 AMD 60 + 2 TEX UMA 55

Site

Mise en place ou
départ du site :

4 h 40
8 hommes

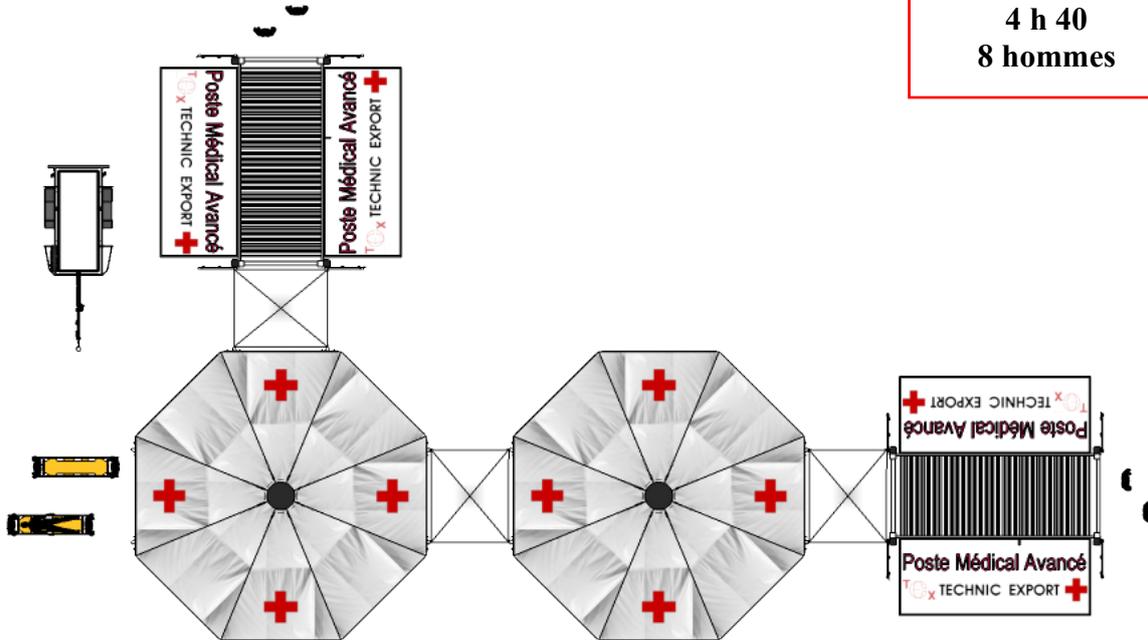

2 AMD 60 (16/20 lits) +
2 containers **TEX UMA 55** déployables avec extensions droite et gauche

Transport



- 1 camion porte-container
- 1 container **TEX UMA 55**
- 1 remorque **AMD 60**



- 1 camion porte-container
- 1 container **TEX UMA 55**
- 1 remorque **AMD 60**




- 1 camion bâché
- + matériels + équipements
- 1 remorque groupe électrogène 125 kVA

E. TEX UMAM – A : 1 AMD 120 + 1 TEX UMA 55

Mise en place ou
départ du site :

2 h 40
4 hommes

Site

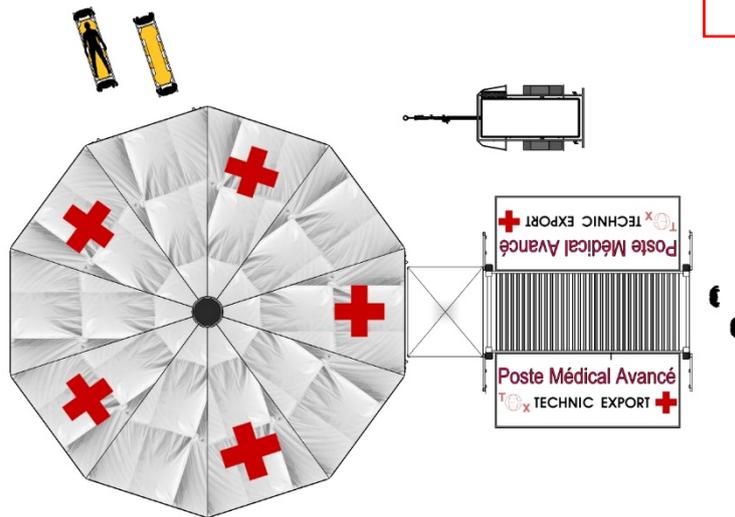

1 AMD 120 (16/20 lits)

+ 1 container **TEX UMA 55** déployable avec extensions droite et gauche

Transport




- 1 camion porte-container
- 1 container **TEX UMA 55**
- 1 remorque AMD 120



- 1 camion bâché
- + matériels + équipements
- 1 remorque groupe électrogène 125 kVA

F. TEX UMAM – B : 1 AMD 120 + 2 TEX UMA 55

Site

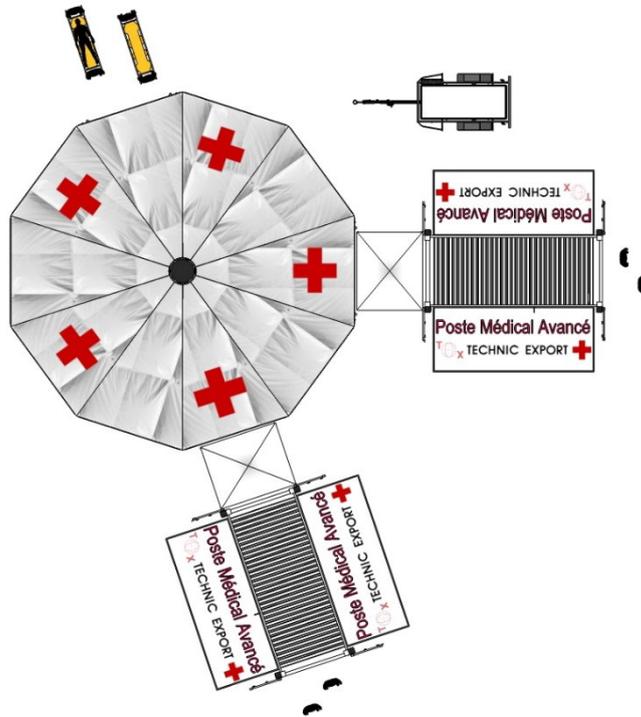

Mise en place ou
départ du site :

4 h 40
6 hommes

1 AMD 120 (16/20 lits) +
2 containers **TEX UMA 55** déployables avec extensions droite et gauche

Transport



- 1 camion porte-container
- 1 container **TEX UMA 55**
- 1 remorque AMD 120




- 1 camion porte-container
- 1 container **TEX UMA 55**
- 1 remorque groupe électrogène 125 kVA



- 1 camion bâché
- + matériels + équipements

G. TEX UMAM – C : 2 AMD 120 + 1 TEX UMA 55

Site

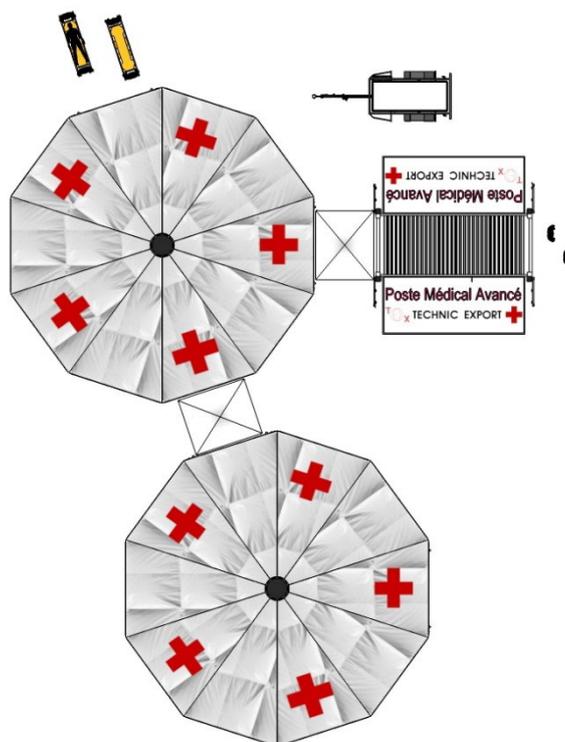

Mise en place ou
départ du site :

3 h 20
6 hommes

2 AMD 120 (32/40 lits) +
1 container **TEX UMA 55** déployable avec extensions droite et gauche

Transport



- 1 camion porte-container
- 1 container **TEX UMA 55**
- 1 remorque AMD 120




- 1 camion bâché
- + matériels + équipements
- 1 remorque AMD 120



- 1 camion bâché
- + matériels + équipements
- 1 remorque groupe électrogène 125 kVA

H. TEX UMAM – D : 2 AMD 120 + 2 TEX UMA 55

Site

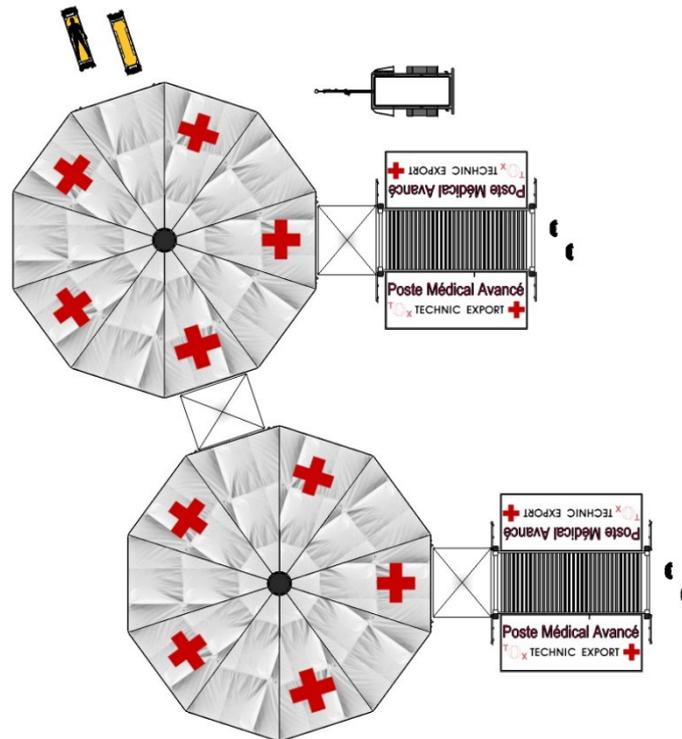

Mise en place ou
départ du site :

5 h 20
8 hommes

2 AMD 120 (32/40 lits) +
2 containers **TEX UMA 55** déployables avec extensions droite et gauche

Transport



- 1 camion porte-container
- 1 container **TEX UMA 55**
- 1 remorque AMD 120



- 1 camion porte-container
- 1 container **TEX UMA 55**
- 1 remorque AMD 120



- 1 camion bâché
- + matériels + équipements
- 1 remorque groupe électrogène 125 kVA


III – EQUIPEMENTS DE L'UNITE TEX UMAM

POSTE	DESCRIPTION	QUANTITE
01	<p>Abri Mobile Déployable 60 m² avec sa remorque AMD 60</p>  <p><u>Dimensions site :</u> Diamètre : 9,00 m / Hauteur : 3,50 m Pans : 8 / Longueur pan : 3,40 m</p> <p>8 luminaires + 1 coffret électrique (Compris)</p>	1
02	<p>Abri Mobile Déployable 120 m² avec sa remorque AMD 120</p>  <p><u>Dimensions site :</u> Diamètre : 12,00 m / Hauteur : 4,05 m Pans : 10 / Longueur pan : 3,80 m</p> <p>8 luminaires + 1 coffret électrique (Compris)</p>	1

<p>03</p>	<p>Le container TEX Unité Médicale Avancée de 55 m² déployable TEX UMA 55</p>  <p><u>Dimensions site :</u> Longueur container : 6,06 m Largeur container : 2,44 m Hauteur container : 2,59 m Longueur d'une extension : 5,50 m Largeur d'une extension : 2,00 m</p>	<p>1</p>
<p>04</p>	<p>Camion porte-container TEX UMA 55</p>  <p>Camion 4x2 Dernière génération</p> <p>PTAC : 21,00 t / PTRA : 40,00 t Empattement : 4 600 mm</p>	<p>1</p>

<p>05</p>	<p>Camion bâché pour transport matériels et équipements</p>  <p>Camion 4x2 Dernière génération</p> <p>PTAC : 21,00 t / PTRA : 40,00 t Empattement : 4 600 mm</p>	<p>1</p>
<p>06</p>	<p>Remorque groupe électrogène</p>  <p>Remorque tout-chemin renforcée</p> <p>Groupe électrogène de 125 kVA insonorisé - diesel</p>	<p>1</p>

07	<p>Tente pour passage couvert</p> 	1
08	<p>Brancard de secours</p> 	10
09	<p>Lit d'urgence</p> 	10
10	<p>Lit médical</p> 	1
11	<p>Fauteuil médical</p> 	2

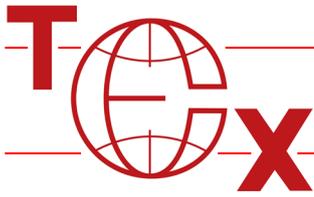

12	Bureau	2
13	Table	3
14	Chaise	6
15	Armoire	2
16	Lot de matériel biomédical : <ul style="list-style-type: none">- Aspirateurs,- Respirateurs,- Moniteurs,- Pousse-seringues,- ...	1
17	Lot de dispositifs médico-secouristes : <ul style="list-style-type: none">- Attelles d'immobilisation,- Garrots,- ...	1
18	Lot de dispositifs médicaux stériles et non stériles : <ul style="list-style-type: none">- Compressees,- Pansements,- Cathéters,- Perfuseurs- ...	1
19	Kit de distribution d'oxygène	1

IV – PHOTOS



L'AMD 60 sur remorque



L'AMD 120 déployé



*Le container **TEX UMA 55** déposé*